



medi

# Wundbehandlung mit medi

Das effiziente Therapiekonzept zur Behandlung  
des Ulcus cruris venosum

Wundbehandl. **medi.** ich fühl mich besser.

# Wundbehandlung mit medi

So behandeln Sie das Ulcus cruris venosum effektiv.

## UCS™ Debridement



## circaid® juxtacures®, mediven ulcer kit®



## Wundreinigung

Reinigung und Pflege von Wunde, Wundrand und Wundumgebung.

## Therapie der Grunderkrankung

Kompression zur Therapie der chronisch venösen Insuffizienz.

mediven® Rund- und Flachstrick



**Rezidivprophylaxe**

Kompression zur Erhaltung des Therapieerfolgs.

**ich fühl mich besser.**



# Wundreinigung

**UCS Debridement – innovatives Wundreinigungssystem für die schmerzfreie Reinigung der Wunde, des Wundrandes und die Pflege der Wundumgebung.**

## Eigenschaften:

- Die Reinigungslösung mit Poloxamer hilft bei der Auflösung des Biofilms, verhindert Hautinfektionen und bekämpft Mikroben<sup>1</sup>
- Die Reinigungslösung ist zellfreundlich und komplett biokompatibel
- Hilft beim Aufbau einer optimalen zellulären Umgebung und erleichtert die Zellerneuerung sowie das Zellwachstum
- Reinigt offene und gereizte Haut, ohne das Abwehrsystem der Haut zu beeinträchtigen<sup>2</sup>
- Vermindert Entzündungen und hilft bei der Regeneration beschädigter Proteine
- Die Wundregion bleibt feucht und elastisch – zur Unterstützung des Heilungsprozesses<sup>2</sup>
- Kein mechanisches Trauma am Wundgewebe<sup>2</sup>

## Vorteile:

- Gebrauchsfertig
- Hocheffizientes Debridement, für den Patienten weitgehend schmerzfrei
- Mit allen modernen Wundauflagen kombinierbar

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>UCS Debridement 1 Box mit 10 Tüchern</b> |                     |
| <b>Als Verbandmittel verordnungsfähig</b>   | <b>PZN 10224798</b> |

## Anwendung:

- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Tuch
- Reinigen Sie die Wunde entsprechend des Wundzustands:
  - Legen Sie das Tuch auf die zu behandelnde Stelle, damit die Lösung in die Haut einziehen kann oder
  - drücken Sie das Tuch über der Wunde aus, sodass die Lösung in die Wunde läuft oder
  - wischen Sie einfach über die Wundfläche
- Sie können beide Seiten des Tuchs verwenden



UCS Debridement

## Hinweis

Ein anschauliches Video zur Anwendung finden Sie hier: [www.medi.de/ucs](http://www.medi.de/ucs)

## Studien

<sup>1</sup> Downe, A.: How wound cleansing and debriding aids management and healing, *Journal of Community Nursing*, 2014 Vol. 28 Nr. 4, S. 33 - 37.

<sup>2</sup> Palumbo, F. P., et al.: A new ulcer cleansing system in the management of „non-healing“ ulcers in elderly, *Poster Presentation Tissue Viability Society, Kettering 2013*.

| Artikel              | Artikelnummer |
|----------------------|---------------|
| 1 Box mit 10 Tüchern | 8972011       |



# Therapie der Grunderkrankung

## circaid juxtacures – Selbstmanagement in der Kompressionstherapie des Ulcus cruris venosum.

### Indikationen

- CEAP C6: Ulcus cruris venosum mit mäßiger bis starker Ödembeteiligung

### Produkteigenschaften

- Unelastisches, atmungsaktives Material für hohen Arbeitsdruck
- Einstellbare Kompression durch das circaid Built-In-Pressure System
- Einstellbarer Umfang – passt sich kleiner werdenden Beinumfangen an
- Garantierter Kompressionsverlauf
- Latexfreies, geruchshemmendes Material mit antibakterieller Wirkung

### Vorteile für Ihre Patienten

- Medizinisch wirksame Kompression<sup>3</sup>, fühlbar angenehm
- Einfache Handhabung des Produkts nach Einstellung durch den Therapeuten
- Eigenverantwortliche Mitgestaltung und Unterstützung der Therapie<sup>4</sup>
- Steigerung der Lebensqualität<sup>4</sup>: Abnehmbar zur Wund- und Körperpflege
- Fördert die Mobilität im Alltag: Tragen normaler Schuhe ist möglich

### Ihre Vorteile

- Zeitsparendes Anlegen im Vergleich zu Wickelbandagen
- Minimale Patientenanleitung erforderlich
- Kosteneffiziente Lösung gegenüber Wickelbandagen (geringerer Material- und Zeitaufwand)

#### circaid juxtacures 1 Box mit 1 Versorgung

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Als Verbandmittel<br>verordnungsfähig | Kurz PZN 11057902<br>Standard PZN 11057919<br>Lang PZN 11057931 |
|---------------------------------------|---|



circaid juxtacures

#### Hinweis

Ein anschauliches Video zur Anwendung und Individualisierung des circaid juxtacures finden Sie hier: [www.medi.de/juxtacures](http://www.medi.de/juxtacures)

#### Studien

<sup>3</sup> Bender, D., et al.: Quantified haemodynamics of compression garments, Veins and Lymphatics 2013, Vol. 2 Nr. 1, S. 30 - 36.

<sup>4</sup> Nugent, L.: Juxta CURES compression for healing venous leg ulcers, British Journal of Community Nursing, September 2013, S. 34 - 39.

| Artikel  | Artikelnummer |
|----------|---------------|
| Kurz     | JU42709       |
| Standard | JU42N09       |
| Lang     | JU42009       |


#### Bestimmung der korrekten Länge

Längenmaß:  
 ↯Boden – Kniekehle  
 Kurz (< 44 cm)  
 Standard (44 – 49 cm)  
 Lang (> 49 cm)



#### 4 einfache Schritte zur individualisierten Kompressionsversorgung


Umfangmaße  
 ↯B & ↯C

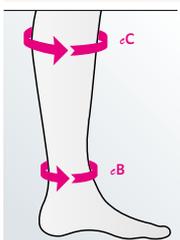

Anpassung der  
 Versorgung an die  
 Umfangmaße



Abschneiden des  
 überschüssigen  
 Materials

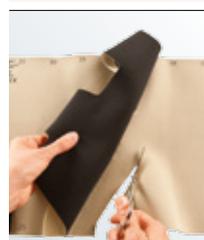

Anlegen der  
 Versorgung





# Therapie der Grunderkrankung

## mediven ulcer kit – innovatives Behandlungskonzept zur Selbstversorgung.

### Indikationen

- CEAP C6: Ulcus cruris venosum mit leichter bis mäßiger Ödembeteiligung
- CEAP C5: Rezidivprophylaxe nach abgeheiltem Ulcus cruris venosum

### Produkteigenschaften

- Innovatives Behandlungskonzept, bestehend aus zwei Komponenten (mediven ulcer und mediven ulcer plus), für eine erfolgreiche Behandlung<sup>5</sup>
- mediven ulcer (mit 20 mmHg im Knöchelbereich) 24 Stunden tragbar - somit auch nachts therapeutisch wirksam
- mediven ulcer plus (mit ebenfalls 20 mmHg im Knöchelbereich) zur Verstärkung der Kompression am Tag
- Farbmarkierung am Knöchel für einfaches und exaktes Positionieren des Strumpfes
- Inspektionsöffnung in der Fußsohle zur einfachen visuellen Untersuchung

### Vorteile für Ihre Patienten


- Optimierte Hygiene dank des einzigartigen Materials mit antibakteriellem Effekt
- Selbstmanagement durch einfaches An- und Ablegen
- Steigerung der Lebensqualität
- Angenehmes Tragegefühl bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit

### Ihre Vorteile

- Farbmarkierung im Rist-Fersenbereich zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Strumpfgröße und exakten Positionierung des Strumpfes
- Förderung der Patientenadhärenz durch Selbstmanagement
- Schnelles Anlegen durch wenige Handgriffe möglich
- Einfache Wundinspektion

### mediven ulcer kit

Verordnungsfähig über  
Hilfsmittelnummer: 17.06.08.1004

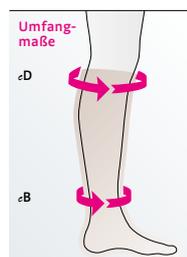

| Anmessen / Größentabelle |               | Größe I | Größe II | Größe III | Größe IV | Größe V | Größe VI | Größe VII |
|--------------------------|---------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|
| Beinmaße (in cm)         | Fessel aB     | 18 – 20 | 20 – 22  | 22 – 24   | 24 – 26  | 26 – 28 | 28 – 30  | 30 – 32   |
|                          | unter Knie aD | 27 – 33 | 29 – 36  | 32 – 39   | 34 – 42  | 36 – 45 | 38 – 48  | 40 – 50   |
| Farbmarkierung           | Ferse         | rosa    | blau     | gelb      | rot      | grau    | grün     | braun     |



mediven ulcer kit

### Hinweis

Weitere Informationen finden Sie hier:  
[www.medi.de/ulcerkit](http://www.medi.de/ulcerkit)

### Studien

- <sup>5</sup> Partsch, H., et al.: Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit, *Phlebology* 2008, 23(1), S. 40 - 46.
- <sup>6</sup> Wolff, O., et al.: The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema, *Phlebologie* 5/2011, S. 245 - 250.

| Artikel  | Artikelnummer |
|--|---------------|
| mediven ulcer kit kurz (ID34 – 38 cm)              | 381709Δ       |
| mediven ulcer kit normal (ID39 – 44 cm)            | 381009Δ       |
| mediven ulcer Refill (Nachfüllpack, je VE 2 Stück) | 8X4019Δ       |

Δ = Bitte die Größe von 1 – 7 ergänzen



# Rezidivprophylaxe

Erhalten Sie den Therapieerfolg langfristig mit **mediven Kompressionsstrümpfen**.

Wichtig für die Wahl des richtigen Kompressionsstrumpfes ist die Unterscheidung von Ruhe- und Arbeitsdruck. Der Ruhedruck beschreibt den Druck, den der Kompressionsstrumpf auf das Bein in Ruheposition ausübt. Je höher die Kompressionsklasse, desto höher der Ruhedruck. Der Arbeitsdruck ist der Gegendruck, den der Strumpf auf die Beinmuskulatur ausübt, wenn sich das Bein bewegt. Je stärker eine Strumpfqualität ist, desto höher ist der Arbeitsdruck. Ein hoher Arbeitsdruck ist besonders bei schweren Indikationen wichtig, da durch ihn die Muskulatur in die Tiefe drückt und den Querschnitt der tiefen Venen verringert.

## mediven® Rundstrick

**Medizinische Kompression bei leichter bis mittlerer Ödemneigung nach abgeheiltem Ulcus cruris venosum.**

### Produkteigenschaften

- Hohe Elastizität
- Arbeitsdruck variiert nach Qualität und Materialbeschaffenheit
- Wirkung: Reduziert den Gefäßdurchmesser (Venen), damit die Venenklappen wieder schließen und somit der venöse Rückfluss von Blut zum Herzen gefördert wird
- Kombination von Mode und medizinischer Wirksamkeit: viele Standard- und Trendfarben erhältlich
- Kompressionsklassen 1, 2, 3
- Erhältlich in 7 Größen und 2 Längen



Beispiel: mediven plus

## mediven® Flachstrick

**Medizinische Kompression bei mittlerer bis starker Ödemneigung nach abgeheiltem Ulcus cruris venosum.**

### Produkteigenschaften

- Hohe Wandstabilität, geringe Elastizität
- Hoher Arbeitsdruck
- Primäre Wirkung: Erhöhung des Gewebedrucks und Mikromassage für einen schnelleren Abtransport von Lympflüssigkeit zur Erhaltung des entödematisierten Zustands
- Sekundäre Wirkung: Verringert den Gefäßdurchmesser, damit die Venenklappen wieder schließen und somit der venöse Rückfluss von Blut zum Herzen gefördert wird
- Modische Vielfalt: 3 Standard-, 7 Trendfarben und 3 Designelemente
- Kompressionsklassen 1, 2, 3, 4
- Individuelle Maßanfertigungen



Beispiel: mediven 550 Bein

### Hinweis

Für weitere Produktinformationen und Hinweise zur Rezeptierung bestellen Sie kostenfrei unseren Indikationsguide Rundstrick (Art. Nr. 20539) und Flachstrick (Art. Nr. 25134). Für eine persönliche Beratung kontaktieren Sie Ihren medi Außen-dienst oder rufen Sie direkt im medi Service Center (0921 912-222) an.



Art. Nr. 20539



Art. Nr. 25134

**Gesunde und gepflegte  
Haut in der  
Rezidivprophylaxe**



## Pflege in der Rezidivprophylaxe – ein wichtiger Baustein. medi Produkte für Haut, Fuß und Strumpf.

### Hautpflege

Gerade in der Rezidivprophylaxe spielt intensive Hautpflege eine große Rolle. Produkte, die exakt auf die Kompressionstherapie abgestimmt sind, eignen sich hierfür am besten. Der beliebte Cremeschaum medi soft bietet ein Plus an Feuchtigkeit. Aber auch das Pflege-Gel für den Tag (medi day) oder das leichte Gel für die Nacht (medi night) haben sich bewährt. An heißen Sommertagen sorgt das kühlende Spray medi fresh für einen angenehmen Frische-Kick zwischendurch. Empfehlen Sie die Hautpflegeprodukte von medi. Ein Tipp, den man Ihnen danken wird.



medi soft – der sanfte  
Cremeschaum mit dem Plus  
an Feuchtigkeit

### Fußpflege

Auch die Füße sollten in der Kompressionstherapie ein Plus an Aufmerksamkeit erhalten. Ganz gleich ob das entspannende Fußbad medi novee, das sanfte Peeling medi smooth oder die reichhaltige Intensiv-Creme medi blando - die medi Fußpflege-Serie hält die Füße fit und schön.



medi novee – das Wohlfühlbad  
für Füße

### Pflege für die Kompressionsstrümpfe

Damit die Strümpfe möglichst lange funktionsfähig bleiben, ist die richtige Pflege enorm wichtig. Weisen Sie Ihre Patienten deshalb darauf hin und empfehlen Sie zur Reinigung der Strümpfe die Produkte von medi. Sie sind speziell auf die Anforderungen eines Kompressionsstrumpfes abgestimmt und fördern die Langlebigkeit des Materials, z. B. der Fleckenstift medi spot ex oder das Waschmittel medi clean (sanftes Handwaschmittel).



medi spot ex – der clevere  
Fleckenstift

## medi Butler – damit gleitet der Strumpf noch einfacher über's Bein.

Die An- und Ausziehhilfen von medi eignen sich für alle Kompressionsstrümpfe, sind stabil und extrem einfach in der Handhabung.

Sie dehnen das Gestrick vor und erleichtern dadurch den Einstieg mit dem Fuß um ein Vielfaches. medi Butler gibt es in neun verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel den medi Lang-Griff Butler.

Optimal ist auch die praktische An- und Ausziehhilfe medi 2in1. Das glatte Material lässt den Strumpf schnell und einfach über das Bein gleiten.

Bei Notwendigkeit können die medi An- und Ausziehhilfen vom Arzt verordnet werden und sind erstattungsfähig (z. B. bei Adipositas oder eingeschränkter Mobilität).



medi Lang-Griff Butler –  
Anziehen leicht gemacht

medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T + 49 921 912-222  
F + 49 921 912-57  
wunde@medi.de  
www.medi.de/wunde



4 049772 412389

50509 / 07/2015